

Manuel de prélèvement
Cerballiance Martinique
Éditer Oct 30, 2023 3:37:12 PM

SCOTCH TEST ANAL

Indications :

Recherche des œufs d'Oxyures.

Renseignements cliniques :

Contexte de la demande

Matériel :

- Ruban adhésif transparent (ne pas utiliser de scotch blanc)
- Lame + porte-lame

Techniques de prélèvement:

A réaliser **au lever avant la toilette et avant les premières selles.**

- Appliquer le côté adhésif d'un morceau de scotch transparent sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes.
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame support.
- Renouveler l'opération avec un second scotch.

Identifier les lames avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire

Transport et conservation :

Les lames doivent être acheminées au laboratoire le matin même dans un porte-lame.

LA VERSION ÉLECTRONIQUE FAIT FOI